



Spray pour instruments avec formule Fluid innovante

mucadont® fluid

Notre plus

- excellentes propriétés de fluage
- utilisation ciblée et économique
- avec formule Fluid innovante: des additifs de soins doux recouvrent tout l'instrument ou l'articulation et contribuent au maintien de sa valeur
- ne colle pas, ne s'étale pas
- expertise microbiologique: garanti sans influence sur le résultat de stérilisation

Domaines d'utilisation

- pour protéger et entretenir les instruments, articulations, charnières métalliques sensibles entre autres
- le maintien de la valeur et du fonctionnement de tous les instruments en métal est garanti
- La corrosion est durablement empêchée

Conseils d'utilisation

Utiliser après nettoyage réglementaire des instruments médicaux en métal (avant la stérilisation). Secouer le flacon avant utilisation. Vaporiser à 20-30 cm de distance sur les zones des instruments souhaitées. Veiller à une vaporisation ciblée pour les articulations en particulier.

CE 0297



Données relatives au produit

Composition:
huile blanche médicale
Agent propulseur: propane, butane

Données physico-chimiques

Couleur	transparent
Densité	0,837 - 0,867 g/cm ³
pH	7 / 20 °C
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	Donnée non disponible

Données de sécurité

F+	Extrêmement inflammable
R12	Extrêmement inflammable.
S16	Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S23	Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.
S53	Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.
S9	Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
mucadont fluid spray 400 ml	12/Carton	230077

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation mucadont® fluid sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Sanaclean AG

Altshoferstrasse 5
6252 Dagmersellen
Tel.: 062 748 49 39
Fax: 062 748 49 38
contact@sanaclean.ch
www.sanaclean.ch



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com