

schülke -†



thermosept® RKN-zym est un nettoyant enzymatique liquide pour le traitement thermique et thermochimique, en particulier de matériaux sensibles, comme par exemple les conteneurs d'élimination.

thermosept® RKN-zym

Notre plus

- Enzymatique, pH neutre
- Peu moussant
- Excellente compatibilité avec les matériaux, en particulier avec l'aluminium anodisé
- Autorisé par Miele

Domaines d'utilisation

thermosept® RKN-zym est conçu pour le traitement d'instruments chirurgicaux et des instruments à invasion minimale, d'endoscopes fixes, d'accessoires d'anesthésie, de conteneurs d'élimination et de produits stériles. thermosept® RKN-zym convient à l'utilisation dans les convoyeurs à bande et les machines individuelles.

Conseils d'utilisation

thermosept® RKN-zym atteint sa meilleure performance de nettoyage entre 40 et 45 °C. Pour éviter les dépôts et les colorations, il est recommandé de neutraliser l'utilisation de thermosept® RKN-zym avec thermosept® NKZ. L'utilisation d'eau déminéralisée dans le rinçage final améliore le résultat de lavage.

CE 0297



Données relatives au produit

Composition:

Marquage conforme au règlement CE N° 648/2004:5- 15 %

tensio-actifs non ioniques, enzymes.

Autres composants: agent solubilisant,

inhibiteurs de corrosion.

Données physico-chimiques

Couleur	jaune clair
Densité	env. 1,01 g/cm ³ / 20 °C
pH	6 - 7,5 / 20 °C / concentré
Point d'éclair	45 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
thermosept RKN-zym 200 kg FA	1/tonneaux	187003
thermosept RKN-zym 5 kg KA	1/jerrycan	187005
thermosept RKN-zym 30 kg KA	1/jerrycan	187006
thermosept RKN-zym 10 kg KA	1/jerrycan	187007
thermosept RKN-zym 20 l KA	1/jerrycan	187008

Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation thermosept® RKN-zym sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Sanaclean AG

Altishoferstrasse 5

6252 Dagmersellen

Tel.: 062 748 49 39

Fax: 062 748 49 38

contact@sanaclean.ch

www.sanaclean.ch

Sanaclean AG



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 44655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com