



Instrumentenpflegespray mit innovativer Fluid Formel

mucadont[®] fluid

Unser Plus

- hervorragende Kriचेigenschaften
- gezielte und sparsame Anwendung
- mit innovativer Fluid-Formel: sanfte Pflegeadditive umschließen das komplette Instrument bzw. Gelenk und tragen zum Werterhalt bei
- ohne Verkleben, ohne Verschmieren
- mikrobiologisch begutachtet - garantiert ohne Beeinflussung des Sterilisationsergebnisses

Anwendungsgebiete

- zum Schutz und zur Pflege von empfindlichen, metallischen Instrumenten, Gelenken, Scharnieren u. ä.
- die Wert- und Funktionserhaltung aller metallischen Instrumente wird sichergestellt
- Korrosion wird nachhaltig verhindert

Anwendungshinweise

Nach sachgemässer Reinigung von medizinischen Instrumenten aus Metall (vor der Sterilisation) anwenden. Die Dose vor Gebrauch schütteln. Die gewünschten Bereiche der Instrumente aus 20 - 30 cm Entfernung einsprühen. Besonders bei Gelenken auf gezieltes Einsprühen achten.



Produktdaten

Zusammensetzung:
medizinische Weißöle
Treibmittel: Propan, Butan

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	0,837 - 0,867 g/cm ³
Farbe	transparent
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Form	flüssig
pH	7 / 20 °C
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

Gefahren- und Sicherheitshinweise

F+	Hochentzündlich
R12	Hochentzündlich.
S16	Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
S23	Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
S53	Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
S 9	Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mucadont fluid spray 400 ml	12/Karton	230077

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Präparat mucadont® fluid Sie im Internet unter www.schuelke.ch

Für Ihre individuellen Fragen richten Sie sich an unser

Exklusivpartner:

Sanaclean AG

Altishoferstrasse 5

6252 Dagmersellen

Tel.: 062 748 49 39

Fax: 062 748 49 38

contact@sanaclean.ch

www.sanaclean.ch



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com