

# schülke -†



Flüssiger, saurer Klarspüler für die maschinelle Aufbereitung von Medizinprodukten und Laborutensilien.

## thermosept® KSK

### Unser Plus

- fleckenfreie Trocknung
- beugt Ablagerungen und Belagsbildungen an Geräten und Spülutern vor
- aktive Trocknungszeitverkürzung
- sehr gute Materialverträglichkeit
- optimale Benetzung des Spülgutes
- von Miele freigegeben

### Anwendungsgebiete

thermosept® KSK ist ein flüssiger, saurer Klarspüler für die maschinelle Aufbereitung von medizinischen Instrumenten, Laborglas und diversen Laborutensilien. thermosept® KSK beschleunigt den Trocknungsprozess und neutralisiert gleichzeitig eventuell aus der Reinigung verschleppte Restalkalität. Das Produkt unterstützt eine fleckenfreie Trocknung bei der thermischen Aufbereitung und beugt der Belagsbildung an Maschinen und Spülgut vor.

### Anwendungshinweise

Dosierung:

0,1 - 0,2 %, (d.h. 1 - 2 ml/l)

Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen. Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Geräte- und Instrumentenhersteller.

CE 0297



## Produktdaten

### Zusammensetzung:

15 - 30 % nichtionische Tenside, Lösungsvermittler, Korrosionsinhibitoren, organische Säure

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,03 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	39 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	ca. 1,8 / 20 °C / Konzentrat
Viskosität, dynamisch	ca. 9 mPa*s / Methode : ISO 3219

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept KSK 5 kg KA	1/Kanister	146604
thermosept KSK 20 l KA	1/Kanister	146608
thermosept KSK 500 kg EC	1/Container	146606

## Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Kanisterhahn f. 5/10 L Kanister	135501
Kanisterschlüssel neutr.5/10l	135810

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Präparat thermosept® KSK vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Für Ihre individuellen Fragen richten Sie sich an unser Exklusivpartner:

### Sanaclean AG

Altishoferstrasse 5  
6252 Dagmersellen  
Tel.: 062 748 49 39  
Fax: 062 748 49 38  
[contact@sanaclean.ch](mailto:contact@sanaclean.ch)  
[www.sanaclean.ch](http://www.sanaclean.ch)

# Sanaclean AG



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

**schülke Schweiz**  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)