

schülke -†



Neutraler Klarspüler für die maschinelle
Aufbereitung von Instrumenten und
medizinischen Utensilien.

thermosept® BSK

Unser Plus

- verkürzt die Trocknungszeit und sorgt für fleckenfreie Abtrocknung
- sehr gute Benetzungseigenschaften
- materialschonend und vielfältig verwendbar
- für eloxiertes Aluminium geeignet

Anwendungsgebiete

Für die schnelle und fleckenfreie Trocknung nach der maschinellen Aufbereitung. thermosept® BSK kann zur Trocknungszeitverkürzung im letzten Spülgang der maschinellen Aufbereitung von medizinischen Instrumenten, Laborglas, Laborutensilien, Containern, Bettgestellen, Transportwagen, Nachttischen etc. in allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Taktbandanlagen verwendet werden.

Anwendungshinweise

Dosierung:
chemothermische Aufbereitung: 0,1 - 0,2 %, (d.h. 1 - 2 ml/l Wasser).

thermische Aufbereitung: 0,02 - 0,1 %, (d.h. 0,2 - 1 ml/l Wasser)

Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen.

Bei der chemothermischen Aufbereitung in Waschanlagen wird empfohlen, das Produkt in Kombination mit der Reinigungs- und Desinfektionskomponente thermosept® NDR zu verwenden. Die Produkte thermosept® NDR und thermosept® BSK sind optimal aufeinander abgestimmt. Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Geräte- und Instrumentenhersteller.

CE 0297



Produktdaten

Zusammensetzung:

15 - 30 % nichtionische Tenside, Korrosionsinhibitoren, Härtestabilisatoren

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,99 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	37 °C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	ca. 7 / 20 °C / (unverdünnt)

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept BSK 10 l KA	1/Kanister	70000171
thermosept BSK -D- 20 l KA	1/Kanister	144907
thermosept BSK 5 kg KA	1/Kanister	144906
thermosept BSK -D- 200 kg FA	1/Fass	144904

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Präparat thermosept® BSK vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch

Für Ihre individuellen Fragen richten Sie sich an unser

Exklusivpartner:

Sanaclean AG

Altishoferstrasse 5

6252 Dagmersellen

Tel.: 062 748 49 39

Fax: 062 748 49 38

contact@sanaclean.ch

www.sanaclean.ch

Sanaclean AG



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com