

schülke -+



thermosept® NDR ist ein neutrales Spezialprodukt zur kombinierten Desinfektion und Reinigung für die chemothermische Aufbereitung. [CE 0297]

thermosept® NDR

Unser Plus

- aldehydfrei
- kombinierte Desinfektion und Reinigung in einem Spülgang
- pH-neutral, daher materialschonend
- entspricht den Forderungen des Arbeitskreises «Bettgestell- und Wagen-Dekontaminationsanlagen» (AK-BWA)
- für Frischwasser- und Umwälzsysteme
- schaumarm
- fleckenfreie Trocknung des Waschgutes

Anwendungsgebiete

Zur chemothermischen Reinigung, Desinfektion und Klarspülung von Bettgestellen, Transportwagen, Containern, Nachttischen, OP-Tischen in allen gängigen Waschanlagen für alle maschinentauglichen Waschgüter, sowie auch gut geeignet für die Aufbereitung von Laborglas und Laborutensilien.

Anwendungshinweise

Zur Vermeidung unerwünschter Wechselwirkungen ist thermosept® NDR nur in Verbindung mit thermosept® BSK einzusetzen.

Beide Produkte sind aufeinander abgestimmt entwickelt worden. Dadurch ist die Abmischbarkeit, wie sie in vielen Waschanlagen zwangsläufig auftritt, gegeben.

Der Einsatz von thermosept® BSK stellt die fleckenfreie Trocknung des Waschgutes sicher. Der in Umwälzanlagen - durch die Klarspüllösung - auftretende Verdünnungseffekt muss durch entsprechend eingestellte Nachdosierung verhindert werden. Dieses gilt natürlich auch, wenn Frischwasser in den Tank gelangt.

Ein täglicher Wechsel der Desinfektionsreinigerflotte ist aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Wirksamkeitsverlusten dringend erforderlich. Nach dem

Ablassen der gebrauchten Desinfektionsreinigerflotte ist der Tank zu reinigen bzw. auszuspülen.

Die in Bettgestell- und Wagen-Dekontaminationsanlagen eingesetzten Behandlungsgüter müssen maschinentauglich sein.

Mikrobiologische Wirksamkeit

thermosept® NDR ist geeignet für Aufbereitungsverfahren im Temperaturbereich von 40 - 80 °C bei einer Einwirkzeit von 60 - 180 Sekunden.

Die Untersuchungen zur mikrobiologischen Wirksamkeit von thermosept® NDR wurden in Anlehnung an die Empfehlungen des AK-BWA durchgeführt (siehe Gutachten).

Anwendungskonzentrationen / Einwirkzeiten

Die Dosierung erfolgt über anlagengesteuerte Dosierpumpen. Die Konzentration beträgt bei thermosept® NDR 0,5 - 1 %, d. h. 5 - 10 g/l Wasser

CE 0297



Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g enthalten: 4,0 g Dioctyldimethylammoniumchlorid, 3,0 g Phenoxypropanole.

Kennzeichnung gemäss VO (EG) Nr. 648/2004:

< 5 % nichtionische Tenside

Weitere Inhaltsstoffe: Lösungsvermittler, Korrosionsinhibitoren, Härtestabilisatoren.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 100 °C / Methode: ISO 2719
Form	flüssig
pH	ca. 6 / 20 °C / Konzentrat

Besondere Hinweise

Die UVV schreibt beim Umgang mit nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln das Tragen von Handschuhen vor. thermosept® NDR darf nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr eingesetzt werden.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept NDR -D- 20 l KA	1/Kanister	144807
thermosept NDR -D- 10 kg KA	1/Kanister	144806
thermosept NDR -D- 200 kg FA	1/Fass	144804

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Kanisterhahn f. 5/10 L Kanister	135501
Kanisterschlüssel für 20 + 25 l	135901
Kanisterschlüssel neutr.5/10l	135810

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Präparat thermosept® NDR vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch

Für Ihre individuellen Fragen richten Sie sich an unser Exklusivpartner:

Sanaclean AG

Altishoferstrasse 5
6252 Dagmersellen
Tel.: 062 748 49 39
Fax: 062 748 49 38
contact@sanaclean.ch
www.sanaclean.ch

Sanaclean AG



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com