

# schülke -†



Saurer Klarspüler und Enthärter für die thermische Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen.

## thermosept® SEK

### Unser Plus

- verhindert den Aufbau von Kalkbelägen
- fördert eine rückstandsfreie Trocknung und Trocknungszeitverkürzung
- schaumarme Formulierung
- gute Materialverträglichkeit

### Anwendungsgebiete

thermosept® SEK ist für die Verwendung zur thermischen Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen in marktüblichen Geräten geeignet. Die spezielle Kombination von Tensiden und Säuren schützt Spülgut und Geräte vor Ablagerungen und unterstützt eine fleckenfreie Abtrocknung.

### Anwendungshinweise

#### Dosierung:

0,01 % pro 1° dH, das entspricht einer Dosierung von 0,1 - 0,3 %, (1 - 3 g/l Wasser).

Die Dosierung erfolgt über maschineneneigene Dosierpumpen, diese sind auf Säurebeständigkeit zu prüfen. Sollte bereits eine starke Verkalkung des Heizstabes festgestellt worden sein, wird empfohlen, vor dem Einsatz von thermosept® SEK eine Entkalkung vorzunehmen (z.B. mit thermosept® NKZ oder thermosept® NKP). thermosept® SEK verhindert auch bei hartem Wasser Kalkablagerungen im Verdampfer und am Heizstab. Um Verkalkungen generell vorzubeugen, sollte neben einer regelmäßigen Wartung darauf geachtet werden, dass ein Kanisterwechsel regelmäßig erfolgt.

CE 0297



## Produktdaten

Zusammensetzung:

15 - 30 % nichtionische Tenside, organische Säuren

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,06 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	66 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	ca. 1 - 2 / 20 °C / Konzentrat

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept SEK SOKA 5 kg KA	1/Kanister	120003
thermosept SEK 5 kg KA	1/Kanister	120002
thermosept SEK 10 kg KA	1/Kanister	120005

## Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Kanisterhahn f. 5/10 L Kanister	135501
Kanisterschlüssel neutr.5/10l	135810

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Präparat thermosept® SEK finden Sie im Internet unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Für Ihre individuellen Fragen richten Sie sich an unser

Exklusivpartner:

**Sanaclean AG**

Altishoferstrasse 5

6252 Dagmersellen

Tel.: 062 748 49 39

Fax: 062 748 49 38

[contact@sanaclean.ch](mailto:contact@sanaclean.ch)

[www.sanaclean.ch](http://www.sanaclean.ch)

# Sanaclean AG



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

**schülke Schweiz**  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)