

schülke -†



Universell einsetzbares Pulverpräparat zur maschinellen, alkalischen Reinigung.

mucapur[®] MP

Unser Plus

- entfernt zuverlässig starke Anschmutzungen wie Blut, Eiweiß und Stärkereste
- besitzt hervorragende Schmutzlöse- und Schmutztrageeigenschaften
- optimal für die Aufbereitung von med. Instrumenten und Laborutensilien
- arbeitet selbsttätig, materialschonend und sehr wirtschaftlich
- mucapur[®] MP wird von Miele empfohlen

Anwendungsgebiete

- alkalische Reinigung von med. Instrumenten und Laborutensilien, für die Aufbereitung von Gegenständen aus Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Porzellan, Quarz und Keramik
- Präparat zum Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG), sowie Haushaltspülmaschinen mit Pulverdosisierung

Anwendungshinweise

Bei normaler Verschmutzung 0,1%ig (10 g/10 l Wasser)
Bei extremer Verschmutzung 0,4 %ig (40 g/10 l Wasser)
Erforderliche Menge mit dem Messbecher entnehmen.
Empfehlungen des Maschinen-Herstellers beachten.

CE 0297



Produktdaten

Zusammensetzung:

Kennzeichnung gem. VO (EG) 648/2004:
 > 30 % Phosphate, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 %
 Bleichmittel auf Chlorbasis
 Weitere Inhaltsstoffe: Alkalien, Silikate, Chlorträger,
 Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe

Chemisch-physikalische Daten

Farbe	weiß
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Form	Pulver
pH	ca. 12 / 5 g/l / 20 °C
Viskosität, dynamisch	Nicht anwendbar

Gefahren- und Sicherheitshinweise



H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P260	Staub nicht einatmen.
P273	
P280	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301 + P330 + P331	Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P303 + P361 + P353	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P305 + P351 + P338 + P310	BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen.
P310	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P501	Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Besondere Hinweise

Enthält Natriummetasilikat.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mucapur MP 10kg Eimer	1/Eimer	230087
mucapur MP 5kg Eimer	1/Eimer	230053

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Präparat mucapur[®] MP Sie im Internet unter www.schuelke.ch

Für Ihre individuellen Fragen richten Sie sich an unser

Exklusivpartner:

Sanaclean AG

Altishoferstrasse 5

6252 Dagmersellen

Tel.: 062 748 49 39

Fax: 062 748 49 38

contact@sanaclean.ch

www.sanaclean.ch



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
 Schülke & Mayr AG
 Sihlfeldstr. 58
 8003 Zürich, Schweiz
 Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
 Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
 Schülke & Mayr GmbH
 Robert-Koch-Str. 2
 22851 Norderstedt
 Deutschland
 Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
 Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.