

schülke -†



Nettoyant universel alcalin pour le traitement automatique des instruments, du verre de laboratoire et divers matériel dans le domaine médical.

mucapur[®] MF

Notre plus

- particulièrement efficace contre les salissures comme le sang, les protéines, les résidus tissulaires ainsi que les salissures tenaces comme les résidus de café et de thé
- convient très bien pour le traitement du verre de laboratoire et des instruments de laboratoire
- concentré économique grâce au faible dosage.
- garantit une très bonne capacité de nettoyage avec de faibles concentrations dès 0,1 %
- formulation sans mousse particulièrement respectueuse du matériel
- Les pièces de la machine sont protégées contre l'encrassement par un séquestrant
- mucapur[®] MF est recommandé par Miele

Domaines d'utilisation

- nettoyage en profondeur et doux des instruments médicaux ainsi que du matériel et des objets usuels du domaine médical et des laboratoires
- pour le traitement de divers matériaux comme le verre, la porcelaine, la céramique, le plastique, le quartz et le métal
- Concentré pour l'utilisation dans les laveurs-désinfecteurs et les convoyeurs de lavage

Conseils d'utilisation

Dosage selon le degré d'encrassement de 0,1 % à 0,5 %.
Le dosage est effectué automatiquement par les pompes de dosage de la machine.
Veuillez observer les conseils techniques d'utilisation des fabricants de machines.

CE 0297



Données relatives au produit

Composition :

identification conformément aux dispositions du règlement (CE) 648/2004 :

5 % - 15 % phosphate, < 5 % polycarboxylate

Autres composants : alcalis, silicates, chlore actif, agents complexants, inhibiteurs de corrosion

Données physico-chimiques

Couleur	jaune clair
Densité	env. 1,30 g/cm ³ / 20 °C
pH	> 12 / 20 °C / concentré
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	Donnée non disponible

Données de sécurité



H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
P280	Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P301 + P330 + P331	EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher.
P305 + P351 + P338 + P310	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P501	Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
mucapur MF 20 I KA	1/jerrycan	230162
mucapur-MF 5 I KA	1/jerrycan	230113
mucapur MF 10 I KA	1/jerrycan	70000174

Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn f. 5/10 L Kanister	135501
Kanisterschlüssel neutr.5/10l	135810

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation mucapur[®] MF sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Sanaclean AG

Altshoferstrasse 5
6252 Dagmersellen
Tel.: 062 748 49 39
Fax: 062 748 49 38
contact@sanaclean.ch
www.sanaclean.ch



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com