



Liquide de rinçage neutre pour le traitement automatique des instruments et du matériel médical.

thermosept® BSK

Notre plus

- réduit le temps de séchage et garantit un séchage sans tache
- très bonnes propriétés de mouillage
- respecte le matériel et s'utilise de manière variée
- convient à l'aluminium anodisé

Domaines d'utilisation

Pour le séchage rapide et sans tache après le traitement automatique. thermosept® BSK s'utilise pour réduire le temps de séchage au cours du dernier cycle de rinçage du traitement automatique des instruments médicaux, du verre de laboratoire et du matériel de laboratoire, des récipients, des cadres de lit, des charriots de transport, des tables de chevet etc.. dans tous les dispositifs de nettoyage et de désinfection et les convoyeurs.

Conseils d'utilisation

Dosage:

Traitement thermochimique: 0,1 - 0,2 %, (soit 1 - 2 ml/l d'eau).

Traitement thermique: 0,02 - 0,1 %, (soit 0,2 - 1 ml/l d'eau)

Le dosage se fait par le biais des pompes de dosage de la machine.

Pour le traitement thermochimique dans des installations de lavage, il est recommandé d'utiliser le produit en combinaison avec les composants de nettoyage et de désinfection thermosept® NDR. Les produits thermosept® NDR et thermosept® BSK sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Veuillez respecter les recommandations des fabricants d'appareils et d'instruments.



Données relatives au produit

Composition :

15 - 30 % de tensioactifs non ioniques, inhibiteurs de corrosion, stabilisateurs de dureté

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 0,99 g/cm ³ / 20 °C
pH	env. 7 / 20 °C / (non dilué)
Point d'éclair	37 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
thermosept BSK-D- 200 kg FA	1/tonneaux	144904
thermosept BSK 5 kg KA	1/jerrycan	144906
thermosept BSK-D- 20 l KA	1/jerrycan	144907
thermosept BSK 10 l KA	1/jerrycan	70000171

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation thermosept® BSK sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Sanaclean AG

Altshoferstrasse 5
6252 Dagmersellen
Tel.: 062 748 49 39
Fax: 062 748 49 38
contact@sanaclean.ch
www.sanaclean.ch

Sanaclean AG



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com