



Solution alcaline en poudre utilisable de manière universelle pour le nettoyage automatique.

## mucapur<sup>®</sup> MP

### Notre plus

- supprime fiablement les salissures fortes comme le sang, les protéines et les résidus d'amidon
- possède d'excellentes propriétés dissolvantes et dispersantes
- optimal pour le traitement des instruments médicaux et du matériel de laboratoire
- travaille de manière automatique, respecte le matériel et est très économique
- mucapur<sup>®</sup> MP est recommandé par Miele

### Domaines d'utilisation

- nettoyant alcalin pour instruments médicaux et matériel de laboratoire, pour le traitement des objets en métal, verre, plastique, caoutchouc, porcelaine, quartz et céramique
- Solution à utiliser dans les laveurs-désinfecteurs ainsi que dans les lave-vaisselles avec poudre de dosage

### Conseils d'utilisation

Pour un encrassement normal, 0,1% (10 g/10 l d'eau)  
Pour un encrassement très important, 0,4 % (40 g/10 l d'eau)  
Prélever la quantité nécessaire avec le verre doseur. Veuillez respecter les recommandations du fabricant de machines.

CE 0297



## Données relatives au produit

### Composition :

identification conformément aux dispositions du règlement (CE) 648/2004 :

> 30 % de phosphates, < 5 % tensioactifs non ioniques, < 5 % agents de blanchiment oxygénés

Autres composants : alcalis, silicates, agents chlorés, inhibiteurs de corrosion, excipients

### Données physico-chimiques

Couleur	blanc
pH	env. 12 / 5 g/l / 20 °C
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	poudre
Viscosité dynamique	Non applicable

## Données de sécurité



<b>H314</b>	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
<b>H335</b>	Peut irriter les voies respiratoires.
<b>H411</b>	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
<b>P260</b>	Ne pas respirer les poussières.
<b>P273</b>	Éviter le rejet dans l'environnement.
<b>P280</b>	Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
<b>P301 + P330 + P331</b>	EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
<b>P303 + P361 + P353</b>	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher.
<b>P305 + P351 + P338 + P310</b>	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
<b>P501</b>	Éliminer le contenu/réceptacle dans une installation d'élimination des déchets agréée.

## Remarques particulières

Contient du métrasilicate de sodium.



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

**schülke Suisse**  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Suisse  
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
www.schuelke.ch  
mail.ch@schuelke.com

**schülke siège principal**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
mail@schuelke.com

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
mucapur MP 5kg Eimer	1/seau	230053
mucapur MP 10kg Eimer	1/seau	230087

## Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation mucapur<sup>®</sup> MP sur Internet sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Pour vos questions individuelles :

**Sanaclean AG**  
Altishoferstrasse 5  
6252 Dagmersellen  
Tel.: 062 748 49 39  
Fax: 062 748 49 38  
[contact@sanaclean.ch](mailto:contact@sanaclean.ch)  
[www.sanaclean.ch](http://www.sanaclean.ch)

# Sanaclean AG